




333® swine oral fluids

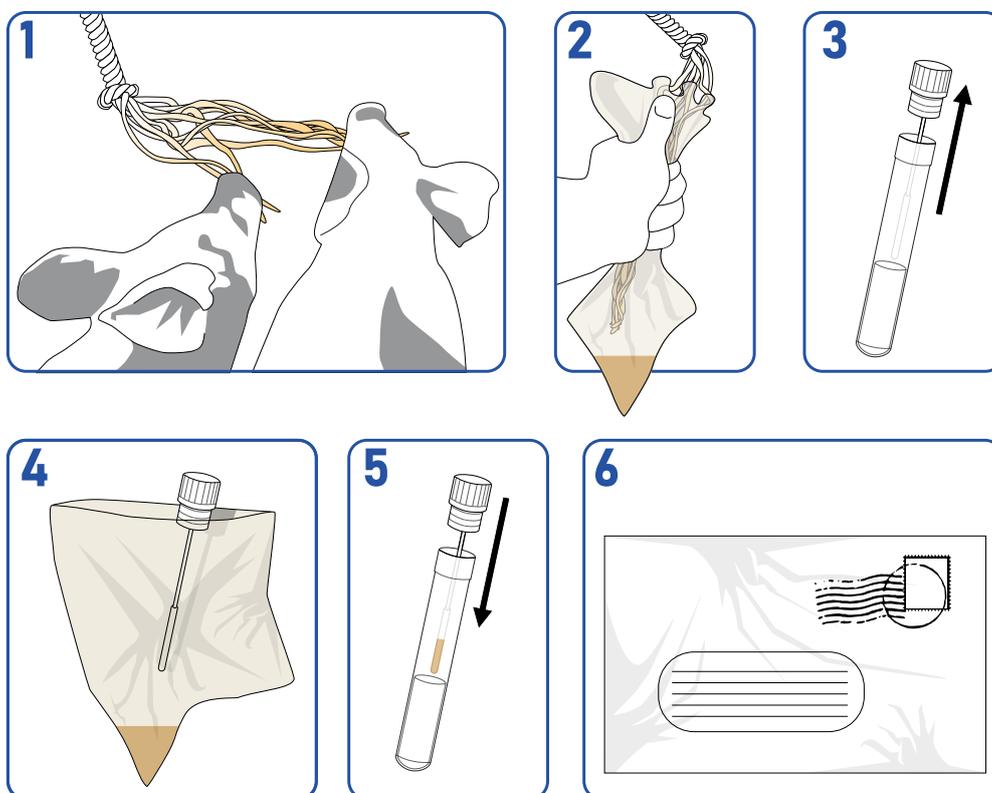

Kit para coleta de amostras de fluidos orais 333

333 desenvolveu este kit para recolher amostras de fluidos orais em porcos. A equipa da 333 baseou-se nos kits tradicionais que estão no mercado, melhorando o armazenamento e o transporte da amostra com a incorporação da zaragatoa Geno Tube. O kit tem todos os elementos necessários para recolher amostras de fluidos orais, embalá-los e transportá-los.

As suas amostras da exploração para o laboratório em 4 etapas simples:

- 1- Coloque a corda a uma altura média e fixe-a firmemente. Deixe que os porcos a mastiguem por alguns minutos (de 15 a 30);
- 2- Usando luvas para evitar contágio e manipulação da amostra, remova a corda e drene o líquido obtido para dentro do saco plástico;
- 3- Destape o tubo e mergulhe a zaragatoa, Geno Tube, no líquido. Cubra o tubo e espere que a amostra seque com seu sistema de secagem patenteado que permite que as enzimas e proteínas sejam preservadas e que o DNA permaneça estável por 36 meses;
- 4- Envie a amostra para o laboratório. Geno Tube pode ser transportado e armazenado em condições normais sem refrigeração e também pode ser usado para realizar uma ampla variedade de diagnósticos de antígeno ou anticorpo (por exemplo, PCR, ELISA, etc.).